

## Montre/Médailleon d'appel Patient (Emetteur/Récepteur radio) NITX-AAA / NITX-BAA

### Caractéristiques

- Montre/Médailleon d'appel radio qui peut être portée au poignet ou autour du cou comme pendentif.
- Bouton d'appel large avec LED de tranquillisation
- Robuste et protection IP67
- Bracelet anti-arrachement
- Alarme automatique d'arrachement/d'enlèvement (version montre-bracelet)
- Boutons, bagues et attaches de bracelet de différentes couleurs interchangeables pour une personnalisation des médaillons
- Communication en mode full duplex, fréquence 869MHz, pour une portée minimum de 30 mètres.
- La version de Montre/Médailleon NITX-BAA inclut un récepteur basse fréquence en 125KHz pour l'annulation d'appel et la localisation.
- Signal régulier de supervision pour identifier un défaut d'équipement ou de hors zone de couverture sur le système.
- Plusieurs niveaux d'appels, incluant l'annulation et l'acquiescement d'alarme.
- Paramètres programmables par voie radio

- Batterie remplaçable et alarme batterie basse.
- Compatibilité avec la localisation système teleCARE IP avec phonie



### Description

La montre/médailleon NITX est un mobile d'appel destiné aux résidents/patients. Il est utilisé dans le système teleCARE IP et dans les systèmes ascom de dépendance à domicile.

La montre/médailleon NITX (AAA et BAA) contient un émetteur-récepteur de fréquence 869 MHz, un bouton d'appel et une LED de tranquillisation. La version NITX-BAA inclut également un récepteur basse fréquence 125KHz utilisé pour la localisation via des balises basse fréquence (LF) et pour l'acquiescement d'appel patient à l'aide d'un médaillon/badge d'acquit du personnel soignant.

Chaque NITX a une IDentification UNIQUE qui est transmise par chaque événement depuis le portatif.

Un appel 'Normal' s'active par une pression courte sur le bouton, un appel d'assistance s'active en appuyant sur le bouton pendant plus de 3 secondes. Un appel peut être annulé à distance, par une unité d'appel fixe 3 boutons (unité bloc de porte), par la messagerie interactive d'un mobile ascom ou en appuyant sur le bouton de la montre/médailleon 4 fois dans les 3 secondes. (une pression longue, puis 3 courtes)

Le NITX a un paramétrage de connexions sur le circuit imprimé qui peut être utilisé pour connecter un contact d'alarme externe, contact sec de type NO..


Le NITX est alimenté par une pile lithium de 3 volts, remplaçable si nécessaire. La tension de la pile est surveillée en permanence et si un niveau de tension basse est détectée (sous 2.4V), une alarme 'batterie/pile basse' est transmise au système teleCARE IP

La montre/médailleon NITX peut être portée autour du poignet comme une montre-bracelet. Alternativement, il peut être équipé d'un support pendentif avec cordon pouvant ainsi être porté autour du cou. Le bracelet et le support cordon sont disponibles comme accessoires et peuvent être commandés séparément.

La montre/médailleon NITX peut être personnalisée aux besoins du client avec des bagues/anneaux, des boutons interchangeables et des boucles/attaches de bracelet disponibles dans un grand choix de couleurs. Les quatre bagues/anneaux et les six boutons incluant aussi un outil de montage sont disponibles sous forme de kit de personnalisation. Quatre boucles/attaches de couleur pour bracelet et le clip de sécurité anti-arrachement sont disponibles comme kit d'accessoires.

Le NITX est résistant à l'eau (IP 67) ainsi il peut être porté dans la douche et sous la pluie.

## Spécifications Techniques

SPECIFICITES INTERNATIONALES		EU
<b>Référence article:</b>	<b>NITX-AAA:</b> Fréquence (RF)	X
	<b>NITX-BAA:</b> Fréquence (RF & LF)	X
<b>Dimensions (W x H x D)</b>	Bracelet Montre: 65mm x 40mm x 14.9mm	X
	Pendentif/Médaille: 78.4mm x 41.8mm x 15mm	X
<b>Matériaux:</b>	Boîtier: Plastique PC/ABS Bague/Anneau et Bouton: ABS-Polylac Bracelet Montre: Silicone Polysil (Médical) Boucle: Acier inoxydable	X
<b>Couleur:</b>	Boîtier et bracelet montre: NCS 8502-B (Noir)	X
<b>Poids:</b>	Bracelet: 39g Pendentif/Médaille: 33g	X
<b>Batterie:</b>	Lithium 3V / 600mAh (type CR2450 ou équivalent)	X
<b>Batterie: Durée de vie</b>	1 an approximativement (50 appels / annulations par jour)	X
<b>Fréquence de transmission (RF):</b>	869.2125Mhz	X
<b>Puissance de Sortie (RF):</b>	+6dbm	X
<b>Niveau de Transmission/ Portée (RF):</b>	30 mètres minimum	X
<b>ID (Identité) (RF):</b>	Jusqu'à 1 million de code d'identité unique	X
<b>Réception Basse Fréquence (LF):</b>	125Khz (uniquement les versions NITX-BAA)	X
<b>Entrée d'Alarme externe:</b>	Points à souder sur la carte électronique pour contact sec de type NO, Normalement Ouvert	X
<b>Environnement:</b>	Température de fonctionnement: de 0°C à +40°C Température de stockage: de -25°C à +55°C Humidité relative: de 30 à 85% (Sans condensation) Niveau de Protection, d'Étanchéité: IP67	X
<b>Conformités et Réglementations EU/EFTA:</b>	 VDE 0834 RoHS 2011/65/EU and EMC 2004/108/EC: Sans plomb Conforme aux dates, amendements des normes suivantes EN. Les références, dates et amendements sont énoncées dans le document 'Declaration of Conformity' Uniquement en GB EN 55022 EN 55024 EN 60950-1	
Continuer page suivante:		

**SPECIFICITES INTERNATIONALES (suite)**

**Accessoires:**


**Kit de personnalisation: 660422 X**

Bagues:



- NCS 8502-B (Noir)
- NCS 4502-B (Gris clair)
- Argent
- NCS 0500-N (Blanc)

Outil de montage/  
démontage Bague/Anneau:

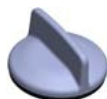

Boutons:



- NCS 8502-B (Gris/Noir)
- Argent
- NCS 0500-N (Blanc)
- NCS 2570-R (Rouge)
- NCS 5040-G20Y (Vert)
- NCS 2070-Y50R (Ambre/Jaune-Orange)

**Kit d'Accessoire: 660425 X**

Boucles/Attaches de  
couleur:  
(Incluant un clip de sécurité  
anti-arrachement.)



- NCS 2070-Y50R - (Ambre/Jaune-Orange)
- NCS 2060-R40B - (Violet)
- NCS 1050-G60Y (Bleu)
- NCS 0575-G60Y - (Jaune)
- NCS 8502-B - (Noir)

**Pieces Détachées**

**Spare Parts:**

Bracelet:

(Incluant 2 attaches/axes à  
ressort et un clip de sécurité  
anti-arrachement.)

**660423**

Noir NCS 8502-B



**X**

Support Pendentif  
médaillon avec cordon:

**660421**

Noir NCS 8502-B



**X**

Boîtier de remplacement  
NITX:  
(Incluant 4 vis Torx et joint)

**660424**

Noir NCS 8502-B



**X**

## SPECIFICITES INTERNATIONALES (suite)

Pile pour NITX :

**660426**

**X**



Référence: CR2450

Vis Torx pour NITX :

**660427**

**X**



(kit de 20 pièces)

Un tourne vis spécifique à tête torx (T3) est nécessaire.